



FIȘA TEHNICĂ

Denumirea produsului: KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE

Caracteristici fizico-chimice:

ASPECT:	lichid transparent
CULOARE:	transparent
MIROS:	parfum
Ph:	10± 0.5
SOLUBILITATE:	completă în orice proporție
CARACTER CHIMIC:	cationic
BIODEGRABILITATE:	> 90%
TERMEN DE VALABILITATE:	3 ani de la data fabricației



Domeniul de aplicare: KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE este folosit pentru curatarea și dezinfectarea:

- *suprafetelor* – domeniul medical/industrial/institutional/casnic/colectivitati
- *instrumentarului* – domeniul medical
- *microaeroflorei* – domeniul medical/industrial/institutional/ casnic/colectivitati.

Utilizarea substanței/preparatului: Curatarea și dezinfecția suprafețelor de lucru, a obiectelor de inventar, instrumentarului și a microaeroflorei din spații private și zone de sănătate publică. Se poate utiliza pentru dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum medicale.

Se utilizează în domeniul medical, public, privat, instituțional. Necesită clătire dacă se dezinfectează instrumentarul invaziv sau suprafețele ce iau contact direct cu pacientul.

Tip produs biocid: GRUPA PRINCIPALA I, TP 2 - Dezinfectant de nivel înalt.

Este o soluție cu proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acțiune biocidă, creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecția. Substanțele active sunt sărurile cuaternare de amoniu.

Compoziția chimică la 100 g produs:

Substanța activă:

- 0,34g Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5 , CE: 230-525-2 ,
- 0,09g Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4

Alte ingrediente: surfactanți nonionici, parfum, agent de chelatizare și apă.

Mod de utilizare:

- **Suprafețe:** Se pulverizează produsul direct pe zona care necesită curățare și/sau dezinfectare și se distribuie uniform soluția activă peste întreaga suprafață și obiectele care trebuie dezinfectate (se poate utiliza o bucată de material textil nețesut). Se lasă să acționeze 5 minute. Nu se clătește.
 - **Instrumentar:** se introduce produsul KLINTENSIV® SUPRAFETE în cuva, apoi instrumentarul ce se dorește a se dezinfecta. Se lasă la dezinfectat minim 10 minute, în funcție de necesarul de decontaminare microbiologică.
 - **Microaeroflora:** Se introduce în rezervorul aparatului de nebulizare cantitatea de dezinfectant calculată în funcție de volumul încăperii (10 ml/1 metru cub). În momentul acționării aparatului, în încăpere nu va fi nici o persoană. Se porneste aparatul până la terminarea soluției din rezervor, apoi se lasă soluția să acționeze timp de minim 10 min, în funcție de necesarul de decontaminare microbiologică.
- Timp de acțiune: 5 minute – dezinfecție de nivel mediu și scăzut; 60 minute – dezinfecție de nivel înalt.



Activitate biocida și standarde:

KLINTENSIV DEZINFECTANT SUPRAFETE			AVIZ NR. 2266BIO/02/12.24		
Activitate biocida	Standard	Conditii testare	Organism testat	Concentratie	Timp contact
Bactericida	SR EN 1276	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute
Bactericida	SR EN 13697	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute
Bactericida	SR EN 13727	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute
Bactericida	SR EN 14561	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	15 minute
Fungicida	SR EN 1650	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	5 minute
Fungicida	SR EN 13624	Curatenie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	5 minute
Fungicida	SR EN 13697	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	30 minute
Fungicida	SR EN 13697	Curatenie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	15 minute
Fungicida	SR EN 14562	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	60 minute
Leverucida	SR EN 1650	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 13624	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 13697	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute
Leverucida	SR EN 14562	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	10 minute
Sporicida	SR EN 13704	Curatenie	Bacillus subtilis ATCC6633	nediluat - ca atare	60 minute
Micobactericida/ Tuberculocida	SR EN 14348	Murdarie	Mycobacterium avium ATCC 15769 Mycobacterium terrae ATCC 15755	nediluat - ca atare	60 minute
Virucida	SR EN 14476+A1	Murdarie	Poliovirus type 1 Murine Norovirus Adenovirus type 5	nediluat - ca atare	5 minute

Indicații de utilizare:

Domeniul de utilizare - unitati sanitare				
Metoda de aplicare	Concentratie	Utilizare	Eficacitate biocida	Timp actiune
Prin pulverizare, stergere, imersie	Nediluat 100% - produs gata de utilizare	Suprafete	Bactericid, fungicid, leverucid, virucid	5 minute
			Bactericid, fungicid, leverucid, virucid, micobactericid, tuberculocid, sporicid	60 minute
		Instrumentar	Virucid	5 minute
			Leverucid	10 minute
			Bactericid	15 minute
			Bactericid, fungicid, leverucid, virucid, micobactericid, tuberculocid, sporicid	60 minute
Domeniul de utilizare - industrial, casnic				
Prin pulverizare, stergere, imersie	Nediluat 100% - produs gata de utilizare	Suprafete	Bactericid, fungicid, leverucid, virucid	5 minute
			Bactericid, fungicid, leverucid, virucid, micobactericid, tuberculocid, sporicid	60 minute
		Instrumentar	Virucid	5 minute
			Leverucid	10 minute
			Bactericid	15 minute
			Bactericid, fungicid, leverucid, virucid, micobactericid, tuberculocid, sporicid	60 minute

Ambalare: 100/150/200/250/500/750/1000/5000ml, 2 litri, 3 litri, 10 litri, 20 litri, 50 litri, 100 litri, 200 litri, 1000 litri.



Transport, livrare, depozitare: KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între +5°C la +30°C.

Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza fișelor tehnice, a buletinelor de analiză și avizul sanitar.

Precauțiuni de utilizare:

Pictograme, simboluri pentru pericole:



GHS07

Cuvânt de avertizare : Atenție!

Fraze de pericol (H):

H 302 – Nociv în caz de înghițire

Fraze de precauție (P):

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305 + P351 + P338 – În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P319 – Colectați scurgerile de produs

Acest produs este destinat pentru uz profesional, industrial și casnic și se va folosi după citirea instrucțiunilor de utilizare în cazul personalului nespecializat.

Se va utiliza cu mănuși de protecție. Se recomandă a fi utilizat în încăperi bine aerisite și ventilate. Produsul va fi păstrat închis, în ambalajul original, la răcoare și la loc uscat. Este indicat a se evita contactul KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE cu alte produse cu activitate biocidă, sau cu alți detergenți în special cu cei care conțin surfactanți anionici sau aldehide.



Fișă cu date de Securitate conform CE 1907/2006 (REACH)

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

- **Denumire comercială:** KLINTENSIV® STERISOL

1.2 Utilizarea substanței/preparatului: Detergent dezinfectant uz profesional pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor și a microaeroflorei din spații private și zone de sănătate publică. Se poate utiliza și pentru curățarea și dezinfectarea instrumentarului.

1.3 Utilizări relevante identificate ale substanței/amestecului:

- Curățarea și dezinfectarea suprafețelor – domeniul medical/industrial/institucional/casnic/colectivități
- Curățarea și dezinfectarea microaeroflorei – domeniul medical/industrial/institucional/casnic/ (10 ml/mc)
- Se poate utiliza și pentru curățarea și dezinfectarea instrumentarului – domeniul medical/industrial.

KLINTENSIV® STERISOL este un detergent dezinfectant pentru uz profesional. Se utilizează pentru curățarea, dezinfectarea suprafețelor și a microaeroflorei. Se utilizează pe toate tipurile de suprafețe, inclusiv cele intens circulate (lemn, pardoseli, faianță, PVC, inox, sticlă, plastic, mobilier, ceramica, brancarde, carucioare, scaune mobile, canapele consultative, mese tratament, grupuri sanitare, saloane nou-născuți, etc). Se mai poate folosi și la dezinfectarea instrumentarului medical și a ustensilelor de laborator, echipamentelor, recipientelor, ustensilelor din cabinete medicale, unități sanitare. Se pot curăța și dezinfecta suprafețele, echipamentele, microaeroflora și, eventual, instrumentarul din saloane cosmetice, zone industriale, farmaceutice, de preparare a hranei, etc.

Nu decolorează, nu albește, nu se clătește (pentru utilizarea pe suprafețe și microaeroflora), nu fixează proteinele pe suprafețe. Se poate utiliza și în spațiile de distribuție a hranei pacienților. Dezinfectantul gata de lucru KLINTENSIV® acționează și în prezența materiilor organice precum sânge, fluide fiziologice. Asigură o dizolvare rapidă a reziduurilor proteice.

Pentru dezinfectarea microaeroflorei: soluția gata de lucru se introduce în nebulizator (10 ml/ 1 m³). Se porneste nebulizatorul pentru aproximativ 30 minute (în funcție de caracteristicile tehnice ale aparatului), apoi se lasă soluția să acționeze un timp de minim 10 min. În timpul nebulizării și acționării soluției de lucru, camera în care se efectuează nebulizarea trebuie să aibă toate ușile și geamurile închise și să nu fie persoane în interiorul acesteia. După cele aproximativ 40 minute este nevoie de aerisire.

Atenție! Nu se folosește pentru suprafețe/instrumentar care ia contact direct cu hrana/produse alimentare. Produsul nu conține iod, aldehide, fenoli, clor, parfumuri, compusi organici volatili. Produs puternic dezodorizant.

1.4 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

- Producător: **PRO INTEGRATOR SRL**, Șos. București–Alexandria km.14, nr.544, hala C 34 A, Bragadiru, jud. Ilfov, Telefon: 021 448 14 98, mail: office@klintensiv.com
- Informații suplimentare asigurate de: **PRO INTEGRATOR SRL**, Șos. București–Alexandria km.14, nr. 544, hala C 34 A, Bragadiru, jud. Ilfov, Telefon: 021 448 14 98, mail: office@klintensiv.com

1.5 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică: Tel: 40 21-318.36.06, orar de funcționare: luni-vineri de la 8-15.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

2.1.1 Clasificare în conformitate cu cerințele Regulamentului CE Nr. 1272/2008

Toxicitate acută orală categ. 4 (H 302 – Nociv în caz de înghițire)

2.2 Elemente pentru etichetă. Etichetare CLP -

KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE este un produs profesional și se va folosi, cu cunoașterea normelor de siguranță în domeniu, în conformitate cu cerințele Regulamentului CE Nr. 1272/2008.

Pictograme pentru pericole



GHS07

Cuvânt de avertizare : Atenție !

Fraze de pericol:

H302 Nociv în caz de înghițire



Fraze de precauție:

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305+P351+P338 În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P319 Colectați scurgerile de produs

2.3 Componente periculoase care determină etichetarea:

- Clorura de didecildimetilamoniu;
- Compusi de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alkildimetil, cloruri;

2.4 Alte pericole

Produsul finit nu conține substanțe/amestecuri clasificate ca fiind periculoase (SVHC)

- PBT: neaplicabil
- VPvB: neaplicabil

3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

- Caracterizare chimică:** Amestecuri
- Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi
- Compoziție/informații privind componentii**

3.1 Substanțe: Acest produs este un amestec (va rugăm să citiți secțiunea 3.2).

3.2 Compoziție: Clasificare conform Regulamentului CE NR. 1272/2008

Nume	Nr. CAS	Nr. CE	Clase de pericole	Concentrație
Didecyl dimethyl ammonium chloride. Nr. INDEX: 612-131-00-6	7173-51-5	230-525-2	Toxicitate acută categ 4 Coroziv pt piele categ 1B	0,34%
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	270-325-2	-	0,09%

3.3 Informații suplimentare

Conținutul exact al frazelor de risc se regăsește în capitolul 15.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

- după inhalare:** Îndepărtați accidentatul de sursa de expunere. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome specifice.
- după contactul cu pielea:** În general produsul nu irită pielea. Solicitați asistență medicală dacă aveți acest simptom.
- după contactul cu ochii:** Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultat medicul.
- după înghițire:** Îndepărtați materialul din gură. Trebuie clătită bine gura și băută cât mai multă apă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Pentru informații detaliate despre simptome și efecte a se vedea cap. 11.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratament: Nu există informații disponibile.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Produsul în sine nu arde. Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

A se păstra departe de materialele combustibile.

5.3. Recomandări destinate pompierilor: Mijloace de protecție specifice: Nu sunt necesare măsuri speciale.

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Folosiți echipamentul de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Echipați-vă cu echipament de protecție individuală adecvat (vezi paragraful 8)

Ferțiți-vă de sursele de aprindere.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:

Preveniți infiltrarea produsului în rețeaua de canalizare, în excavații sau în beciuri.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:



Îndepărtați cu mijloace mecanice. Materialul colectat va fi tratat ca „deșeu special” prin depozitare și transport în container, pentru o distrugere autorizată. Pentru informații privind eliminarea în siguranță, a se vedea capitolul 13.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție individuală vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la îndepărtare vezi capitolul 13.

În caz de deversare accidentală minoră, limitată la conținutul unui singur recipient, clătiți cu suficientă apă pentru a îndepărta produsul prin diluare la nivelul concentrației de utilizare normală, exceptând cazul în care aceasta ar conduce la contaminarea unui curs de apă sau a vegetației.

7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- **Sfaturi de manipulare în condiții de securitate:** Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Produs de uz extern - nu înghițiți. A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va prevedea o o ventilație corespunzătoare la locul de muncă. Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevăzute instalații pentru spălarea ochilor, în caz de accident.
- **Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă:** A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare. Îndepărtați imediat echipamentul contaminat.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.2.1 Cerințe spații de depozitare și containere

A se depozita în recipientul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea corespunzătoare a produsului.

A nu se depăși data de expirare de pe ambalaj.

A nu se utiliza ambalajul gol pentru stocarea altor produse sau în alte scopuri decât cel original.

7.2.2 Măsurile de protecție împotriva incendiului și a exploziei

A se păstra departe de orice flacăra sau sursa de scântei. Fumatul interzis.

7.2.3 Informații suplimentare privind condițiile de depozitare

A se păstra preparatul în recipientul închis etanș. Stocați produsul în loc uscat și bine ventilat, la temperatura camerei, departe de sursele de căldură (se va evita o temperatură mai mare de 30°C și mai mică de 5°C). Utilizatorul este unic și direct responsabil pentru cunoașterea și aplicarea acestor reglementări.

A se ține cont și de Normele generale de protecția muncii, adaptate la specificul firmei.

7.2.4. Măsurile de protecție în cazul depozitării în locuri comune

A se păstra departe de hrană, băuturi, alimente și hrană pentru animale. A se păstra departe de materiale combustibile.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vă rugăm să consultați secțiunea 1 privind indicațiile referitoare la produs sau fișa tehnică.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Indicații suplimentare privind dotările tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea paragraf 7.

8.1.1 Parametri de control

- **Valori limită de expunere:** Produsul nu conține cantități relevante de substanțe ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă.
- **Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

8.1.2 Controale ale expunerii - Controlul expunerii profesionale

- **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**
 - A se îndepărta imediat hainele contaminate.
 - A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.
 - A se evita contactul cu ochii.
- **Mască de protecție:** Echipamentul de protecție individuală nu este necesar în mod normal. Cu toate acestea, în timpul folosirii produsului, trebuie evitată inhalarea prafului, vaporilor sau aerosolilor.
- **Protecția mâinilor:** Utilizați mănuși de protecție.
- **Material pentru mănuși** – Piele tratată
- **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși** – Nu există date
- **Protecția ochilor:** Ochelari de protecție bine închiși.

9. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază



- Aspect:
 - Stare de agregare: lichid nevâscos
 - Culoare: slab gălbui
- Miro: parfum
- Valoare pH (50 g/l) la 20°C: 10 ± 0.5
- Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
- Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit
- Punct de inflamabilitate: neaplicabil
- Inflamabilitate (solid, gazos): nedefinit
- Temperatură de aprindere: nedefinit
- Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Presiune vaporică: nedefinit
- Densitate la 20°C: 1 ± 0.1 g/cm³
- Solubilitate în/miscibilitate cu:
 - apă: se amestecă complet
 - alcooli: nedefinit
 - cetone: nedefinit
 - solvenți polari: nedefinit
 - solvenți nepolari: nedefinit
 - hidrocarburi alifatice: nedefinit
 - hidrocarburi aromatice: nedefinit
 - solvenți organici: nedefinit
 - hidrocarburi clorurate: nedefinit
 - uleiuri vegetale: nedefinit
 - glicoli: nedefinit
 - ulei de parafină: nedefinit
- Coeficient de segregare (n-octanol/apă): nedefinit

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate:

Nu are loc nicio reacție periculoasă dacă sunt păstrate instrucțiunile de depozitare și utilizare.

10.2. Stabilitate chimică:

Produsul este stabil dacă sunt păstrate instrucțiunile de depozitare și utilizare.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

Vezi 10.1 și 10.2.

10.4. Condiții de evitat:

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform recomandărilor.

10.5. Posibilitatea de reacții periculoase:

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.6. Produși de descompunere periculoși: Nu sunt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

10.7. Incompatibilitatea cu alte materiale: Nu se amestecă cu alte produse.

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice - Toxicitate acută:

- **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare** - Klintensiv® Dezinfectant Suprafete:

- 0.000375 ml/kg (oral, șoarece)
- 0.00057 ml/kg (dermal, șoarece)
- 0.0046 ml/m³ (inhalare, șoarece)
- 0.000375 <LD50 (estimat) < 0.0046 g/kg

- **Iritații:**

- **pe piele:** Produsul nu este iritant în utilizarea normală.
- **la ochi:** Poate cauza iritații în caz de contact cu ochii.
- **inhalare:** Produsul nu este iritant în utilizarea normală.
- **înghițire:** Nociv în caz de înghițire

- **Sensibilizare:** Nu se cunosc efecte sensibilizante.

11.2 Informații toxicologice suplimentare: În baza metodei de calcul din Directiva Generală a Comunității Europene asupra clasificării preparatelor în ultima sa versiune valabilă, produsul prezintă următoarele riscuri: nociv în caz de înghițire.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE



Următoarele informații se bazează pe datele oferite de furnizori pentru amestecurile folosite.

12.1. Toxicitate

- **Toxicitatea acută acvatică:** nu este toxic pentru mediul acvatic;
- **Toxicitate cronică acvatică:** nu este toxic pentru mediul acvatic;

12.2. Persistență și degradabilitate: nedefinit

12.3. Potențial de bioacumulare: nu există date

12.4. Mobilitate în sol: nu există date

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB: nu există date

12.6. Alte efecte adverse: nu există date

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Metode de tratare a deșeurilor: pentru eliminarea în siguranță a produsului devenit deșeu prin expirare sau deteriorare, se solicită asistența unei persoane juridice autorizate pentru distrugerea acestuia, eliminarea făcându-se conform codului din Catalogul European al Deșeurilor. A se vedea și Ordonanța de Urgență nr. 78/2000 și HG 621/2005, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ambalaje necurățate: ambalajele necontaminate pot fi supuse procesului de reciclare.

Agenți de curățire recomandați: apă

Evitați deversarea produsului în rețeaua de canalizare sau în apele pluviale.

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORTURI

14.1 Numărul ONU

ADR Bunuri nepericuloase

RID Bunuri nepericuloase

ADNR Bunuri nepericuloase

IMDG Bunuri nepericuloase

ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR Bunuri nepericuloase

RID Bunuri nepericuloase

ADNR Bunuri nepericuloase

IMDG Bunuri nepericuloase

ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport III

ADR Bunuri nepericuloase

RID Bunuri nepericuloase

ADNR Bunuri nepericuloase

IMDG Bunuri nepericuloase

ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

ADR Bunuri nepericuloase

RID Bunuri nepericuloase

ADNR Bunuri nepericuloase

IMDG Bunuri nepericuloase

ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR Periculos pentru mediul înconjurător nu

RID Periculos pentru mediul înconjurător nu

ADNR Periculos pentru mediul înconjurător nu

IMDG Poluant marin nu

ICAO/IATA Periculos pentru mediu nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu este clasificat ca produs periculos în sensul reglementărilor de transport.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Observații: Nu există informații disponibile.

Regulamentele de transport includ derogări speciale pentru anumite categorii de materiale periculoase ambalate în cantități limitate.

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau



amestecul în cauză:

- HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase care transpune Directiva Europeană 67 / 548/ EEC cu modificările și completările ulterioare.
- HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase care transpune Directiva Europeană 1999/45/CE cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul European nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificări și completări ulterioare.
- Regulamentul European nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), Anexa I Regulamentul European 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor –CLP cu modificări și completări.
- HG 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase care transpune Directiva Europeană 76/769/EEC, cu modificări și completări.
- HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, care transpune Directiva Europeană 98/24/CE, Directiva Europeană 2000/39/CE cu modificări și completări.
- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificări și completări
- HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, respectiv Directiva Europeană 89/656/CEE.
- Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificări și completări OUG 195/2005 privind protecția mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului.
- Directiva Europeană 75/442/EEC privind deșeurile cu modificări și completări ulterioare
- ADR/RID/ IMDG – ediții în vigoare.

16. ALTE INFORMATII

Informații de pe etichetă: În conformitate cu cerințele Regulamentului CE Nr. 1272/2008

Precuțiuni de utilizare:

Fraze de pericol (H):

H302 Nociv în caz de înghițire



GHS07

Fraze de precauție (P):

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305+P351+P338 În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P319 Colectați scurgerile de produs

Sfat practic: Va rugăm să citiți cu atenție fișa cu date de securitate înainte de a utiliza acest produs. Pentru informații detaliate va rugăm să consultați fișa tehnică a produsului.

Surse de date fundamentale: Informațiile privind securitatea materialelor de la furnizorii de ingrediente, literatura de specialitate precum și reglementările actuale au fost utilizate ca bază pentru pregătirea acestui document privind securitatea materialelor.

Alte informații: Informațiile din această fișa de securitate se bazează pe stadiul actual de cunoștințe și experiența ale producătorului. Aceste informații sunt furnizate doar din motive de siguranță. Sunt oferite cu intenții bune și nu implică un contract legal valabil. Utilizatorii ar trebui să verifice relevanța informațiilor din acest material în concordanță cu propriile lor scopuri. Utilizatorul este responsabil de respectarea tuturor legilor și reglementărilor în vigoare. Utilizatorul este responsabil de utilizarea produsului în alte scopuri decât cele descrise în fișa de securitate sau în combinație cu alte produse. Informațiile din această fișa ar trebui furnizate tuturor celor care vor utiliza, manipula, depozita, transporta sau vor fi expusi indirect la acest produs. Nu ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește acuratețea sau caracterul complet al informațiilor în toate situațiile.

Alerte de actualizare a fișei cu date de securitate: Aveți obligația legală de a avea întotdeauna la îndemână cele mai recente norme FDS de la furnizorul produsului. Înregistrați-vă acum pe www.klintensiv.com pentru a primi mesaje privind actualizarea FDS și veți fi notificat imediat dacă a intervenit vreo schimbare în FDS.



BULETIN TESTARI EFICACITATE

DESCRIERE PRODUS

KLINTENSIV® STERISOL este un dezinfectant de nivel înalt multifuncțional destinat curățării, decontaminării și dezinfectării suprafețelor ne-poroase, și instrumentelor non-critice în spitale, laboratoare și alte zone critice în care controlul contaminării încrucișate între suprafețele tratate este important. Este o soluție cu proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehyde, cu un spectru larg de acțiune biocidă, creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecția.

COMPOZITIE CHIMICA

Substanțe active:

- Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5 , CE: 230-525-2 ,
- Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4

Alte ingrediente: surfactanți nonionici, parfum, agent de chelatizare și apă.

EFICACITATE BIOCIDĂ

KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE			AVIZ NR. 2266BIO/02/12.24				
Activitate biocidă	Standard	Condiții testare	Organism testat	Concentrație	Timp contact	Reducție (lg) SR EN 14855	Rezultat testare
Bactericida	SR EN 1276	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 5	Activitate bactericidală demonstrată
Bactericida	SR EN 13697	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 4	
Bactericida	SR EN 13727	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 5	
Bactericida	SR EN 14561	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	15 minute	lg ≥ 5	
Fungicida	SR EN 1650	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 4	Activitate fungicidă demonstrată
Fungicida	SR EN 13624	Curătenie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	5 minute		
Fungicida	SR EN 13697	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	30 minute		
Fungicida	SR EN 13697	Curătenie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	15 minute		
Fungicida	SR EN 14562	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	60 minute	lg ≥ 4	Activitate levuricidă demonstrată
Levuricida	SR EN 1650	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute		
Levuricida	SR EN 13624	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute		
Levuricida	SR EN 13697	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute		
Levuricida	SR EN 14562	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	10 minute	lg ≥ 3	Activitate sporicidă demonstrată
Sporicida	SR EN 13704	Curătenie	Bacillus subtilis ATCC6633	nediluat - ca atare	60 minute		
Micobactericida/ Tuberculocida	SR EN 14348	Murdarie	Mycobacterium avium ATCC 15769 Mycobacterium terrae ATCC 15755	nediluat - ca atare	60 minute	lg ≥ 4	Activitate micobactericidă demonstrată
Virucida	SR EN 14476+A1	Murdarie	Poliovirus type 1 Murine Norovirus Adenovirus type 5	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 4	

DEZINFECTANT SUPRAFEȚE - STERISOL™

DEZINFECTAREA SUPRAFEȚEI UTILIZÂND STERISOL™:

PULVERIZEAZĂ » ȘTERGE » PULVERIZEAZĂ

Klintensiv®

PASUL 1 - CURĂȚĂ ÎNAINTE DE DEZINFECTARE



1A. Pulverizează cu soluție toată suprafața.



1B. Curăță cu un burete sau cu o lavetă curată.



1C. Aruncă la gunoi.

PASUL 2- DEZINFECTEAZĂ DUPĂ CURĂȚARE



2A. Pulverizează zona, până când este acoperită cu soluție. Suprafața tratată trebuie să rămână umedă, vizibilă timp de 3 minute pentru dezinfecție.



2B. Șterge cu un burete sau cu o lavetă curată.



2C. Aruncă la gunoi.

Sterisol este conceput special ca un detergent general și dezinfectant pentru utilizare în:

- ✓ Spitale
- ✓ Azile
- ✓ Săli de operație
- ✓ Saloane pacienți
- ✓ Zone de terapie intensivă

Cod Produs	Descriere produs	Ambalare
KLI61	Sterisol 500 ml	12 buc/bax
KLI60	Sterisol 1 litru	12 buc/bax
KLI63	Sterisol 5 litri	1 buc/bax




DEZINFECTANT SUPRAFEȚE - STERISOL™

Dacă există reziduuri pe suprafață:

Curăță înainte de a dezinfecta



1. Pulverizează cu soluție toată suprafața.

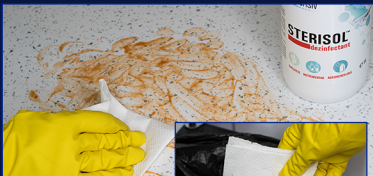

2. Curăță cu un burete sau cu o lavetă curată.



3. Aruncă la gunoi șervețelul.

Dezinfectează după curățare



1. Pulverizează zona, până când este acoperită cu soluție. Suprafața tratată trebuie să rămână umedă, vizibilă timp de 3 minute pentru dezinfecție.



2. Șterge cu un burete sau cu o lavetă curată.



3. Aruncă la gunoi șervețelul.

Dacă NU există reziduuri pe suprafață:

Curăță și dezinfectează



1. Pulverizează zona, până când este acoperită cu soluție. Suprafața tratată trebuie să rămână umedă, vizibilă timp de 3 minute pentru dezinfecție.



2. Șterge cu un burete sau cu o lavetă curată.



3. Aruncă la gunoi șervețelul.

Cod Produs	Descriere produs	Ambalare
KLI61	Sterisol 500 ml	12 buc/bax
KLI60	Sterisol 1 litru	12 buc/bax
KLI63	Sterisol 5 litri	1 buc/bax



Klintensiv®

Pentru mai multe informații vizitați klintensiv.com sau sunați la numărul de telefon 021.448.14.99



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 16.09.2020

AVIZ

Nr. 2266BIO/02/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunile din datele de 30.06.2017, 12.04.2018, 20.09.2017, 29.01.2019, 24.09.2019 și 17.10.2019, 26.03.2020 s-a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

KLINTENSIV DEZINFECTANT SUPRAFETE

Alte denumiri comerciale, după caz

KLINTENSIV-STERISOL; KLINTENSIV HIGH DESINFECTANT RTU; NEXTGUARD RTU
KLINCIDE AF; DAVERA F&B, DAVERA SCHOOL; QUATVET; AEROVET; AEROSAN;
KLINTENSIV-ANTIFUNGIC; KLINTENSIV-DEZINFECTANT WC; AMBIOCIDE; KLINO;
AEROKLIN; ENVIROKLIN; DAVERA HOTELS; DAVERA INSTITUTIONAL; KLINOL; AIRKLIN;
Nextguard Home RTU; Klinol Home premium

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punctul de lucru pentru producătorii din România)

SC KLINTENSIV SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C 34, oras Bragadiru, jud. Ilfov
Romania

Punct de lucru: Sos. Alexandriei, nr. 544, Incinta FNC SABARU, Bragadiru, jud. Ilfov, Romania

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

SC KLINTENSIV SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C 34, oras Bragadiru, jud. Ilfov
Romania

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1	Clorura de didcildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	0,34%
2	Compusi de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alcildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	0,09%



VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Lichid gata de utilizare

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Ambalaj de 100ml; 150mL; 200mL; 500mL; 750mL; 1000mL; 2L, 3L, 5L, 10L, 20L, 50L, 100L, 200L, 1000L.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
B. Aria de aplicare	Dezinfectia și curățarea suprafețelor de lucru și a obiectelor de inventar (scaune de tratament, brate de susținere a lampilor), instrumentar, utilizate în unitățile sanitare, în domeniul industrial și casnic.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de acțiune
Dezinfectia în unitățile sanitare				
Bactericida	EN 13727:2013 în condiții de murdărire	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC10541	97%	5 minute
Bactericida Fungicida	EVS-EN 13697:2015 +A1:2019 În condiții de murdărire	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	100%	5 minute
Bactericida	EN 16615:2015 În condiții de murdărire	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	100%	5 minute
Levuricida	prEN 13624:2019 În condiții de curățenie	<i>Candida albicans</i> ATCC10231	97%	5 minute 60 minute
Fungicida	prEN 13624:2019 În condiții de curățenie	<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	97%	5 minute 30 minute 60 minute
Bactericida ¹	EN13697 În condiții de murdărire	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	100% 50%	5 min
Fungicida ¹	EN 13624 În condiții de curățenie	<i>Aspergillus brasiliensis</i> (ATCC 16404)	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Fungicida ¹	EN 13697 În condiții de curățenie	<i>Aspergillus brasiliensis</i> (ATCC 16404)	Nediluat- gata de utilizare	15 min



IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratie	Timp de actiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Micobacteri ¹ - cida/ Tuberculo- cida	EN 14348 In conditii de murdarie 3g/L albumina bovina	<i>Mycobacterium avium</i> ATCC 15769 <i>Mycobacterium terrae</i> CECT 3028 (ATCC 15755)	Nediluat-gata de utilizare	60 min
Bactericida ²	EN 14561/2007 (Faza2/Etapa2) In conditii de murdarire 3g/L albumina bovina si 3ml/L eritrocite	<i>Staphylococcus aureus</i> CECT 239 (ATCC 6538) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> CECT 116(ATCC 15442) <i>Enterococcus hirae</i> CECT 4081(ATCC 10541)	Nediluat-gata de utilizare	15 min.
Levuricida ²	EN14562/2007 (Faza2/etapa2) In conditii de murdarire 3g/L albumina bovina si 3ml/L eritrocite	<i>Candida albicans</i> CECT 1394(ATCC 10231)	Nediluat-gata de utilizare	10 min
Fungicida ²		<i>Aspergillus brasiliensis</i> CECT2574 (ATCC 16404)		60 min.
Virucida ²	EN 14476:2013+ A1:2015 (Faza 2/Etapa1) In conditii de murdarire (3,0g/L BSA si 3ml/L eritrocite de oaie)	<i>Adenovirus tip5 strain Adenoid</i> 75 ATCC VR-5 MNV S 99 RVB 651, <i>Poliovirus tip 1LSc-2ab</i>	Nediluat-gata de utilizare	5 min.
Sporicida ²	EN 13704/2004 In conditii de curatenie 0,3g/L albumina	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Nediluat-gata de utilizare	60 min.
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"				
Bactericida	SR EN 1276 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC10541 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Bactericida	EN13697 in conditii de murdarire	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Levuricida	EN 13697:2013 La 20°C Faza 2, Etapa 2 In conditii de murdarire 3g/L albumina bovina	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Levuricida	SR EN 1650 In conditii de	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Fungicida	In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina)			



IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"				
Levuricida	SR EN 13624 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina+ 3ml/l eritrocite)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Fungicida				
Levuricida	SR EN 13624 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina+ 3ml/l eritrocite)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Fungicida				
Virucida	SR EN 14476+ A1:2007 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina+ 3ml/l eritrocite)	<i>Poliovirus</i> tip 1, Lsc-2ab <i>Adenovirus</i> tip 5, ATCC VR-5 Adenoid 75	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Micobacteri- cida	SR EN 14348 In conditii de murdarire (3 g/l albumina bovina +3 ml/l eritrocite)	<i>Mycobacterium avium</i> ATCC 15769 <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755	Nediluat- gata de utilizare	5 min
Tuberculo- cida				
Sporicida	EN 13704/2004 In conditii de curatenie 0,3g/L albumina	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Nediluat- gata de utilizare	60 min.

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

X. INDICAȚII DE UTILIZARE				
Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/ doza de aplicare			Timpul de acțiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Prin stergere/ Pulverizare/ Imersie	Ca atare	Suprafete	Eficacitate fungicida bactericida, levuricida, virucida	5 minute
			Eficacitate, micobactericida, sporicidal, tuberculocida	60 minute
	Instrumentar	Eficacitate virucida	5 minute	
		Eficacitate levuricida	10 minute	
		Eficacitate bactericida	15 minute	
		Eficacitate micobactericida, sporicidal, tuberculocida, fungicida	60 minute	
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"				
Prin stergere/ Pulverizare/ Imersie	Ca atare	Suprafete	Eficacitate bactericida, levuricida, virucida	5 minute
			Eficacitate, micobactericida, sporicidal, tuberculocida, fungicida	60 minute

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri si indicarea pericolului	 GHS07
Fraze de pericol (H)	H302–Nociv în caz de înghițire.
Fraze de precauție (P)	P273–Evitați dispersarea în mediu. P301+P312–ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P305+P351+P338–ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P391–Colectați scurgerile de produs.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali, industriali, populație

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu este cazul

Avizul este valabil până la data de 31.12.2024.

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de 16.09.2023, cu urmatoarele precizari:

¹ Eficacitatea bactericid EN 13697, fungicida EN 13624 si EN 13697, micobactericid si tuberculocid EN 14348 este valabila pana la data de 16.04.2021 (extindere emisa la data de 16.04.2018).

² Pentru testele EN 14561/2007, EN 14562/2007, EN14476:2013+A1:2015, EN 13704/2004 pentru care nu s-a depus documentatie conform Art. 7[^]1 din Ordinul nr. 10/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatia de utilizare in unitati sanitare se prelungeste 90 zile de la incetarea starii de alerta conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Avizul conține – 5 pagini

Avizul a fost rescris in data de 16.09.2020

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

